


URETERALE ZUGANGSSCHLEUSE mit atraumatischem Spitzenübergang

Ureterale Zugangsschleuse

- Patentiertes Spitzendesign für sanfte Dilatation des Harnleiters
- Hydrophile Beschichtung zur einfachen Einlage auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen
- PTFE beschichtetes Innenlumen der Schleuse bietet optimale Gleiteigenschaften für Wechsellinieninstrumente
- Platinmarker am Ende der Schleuse ermöglicht beste Sichtbarkeit im Röntgen

Bestellnummer	Innendurchmesser (CH/FR)	Außendurchmesser (CH/FR)	Länge (cm)
AS-1235	10	12	35
AS-1245	10	12	45
AS-1435	12	14	35
AS-1445	12	14	45
AS-1635	14	16	35
AS-1645	14	16	45


Kurzanleitung

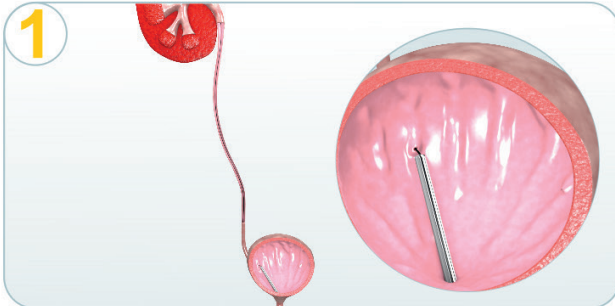


1

- Führungsdraht über das Zystoskop einlegen

- Führen Sie den Dilatator in die Schleuse ein
- Sobald die **rote Markierung** erscheint, ist das System fixiert

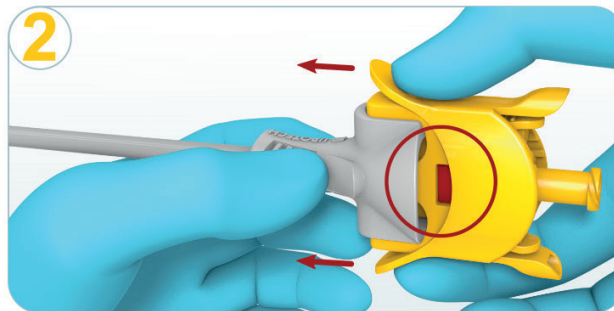


2

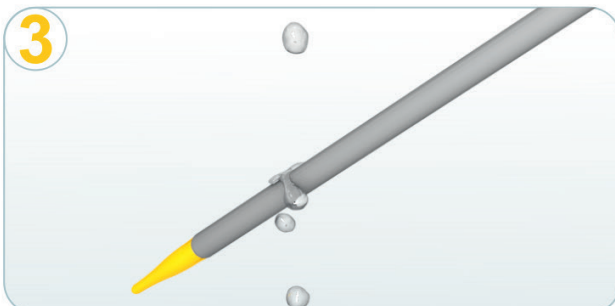


3

- Aktivieren Sie die hydrophile Beschichtung mit Aqua Dest

- Führen Sie die Schleuse über den Führungsdraht ein

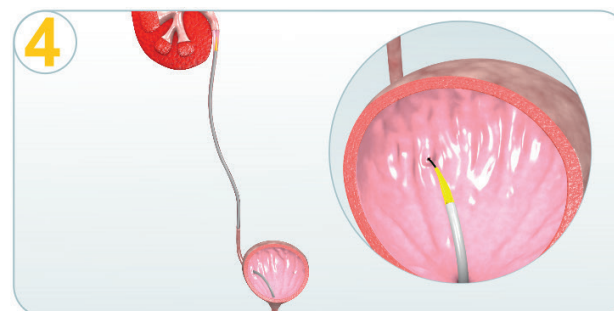

4

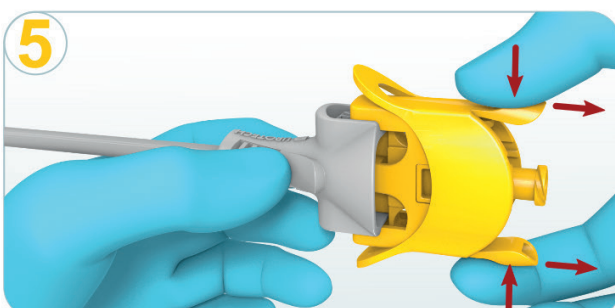

5

- Drücken Sie beide Flügelenden zusammen und entfernen Sie den Dilatator