

SL

Navodila za uporabo

Komplet za direktno punkcijo pri nefrostomiji Renodrain in Magnusson

Opozorilo: ta medicinski izdelek lahko pridobi in uporablja samo usposobljeno medicinsko osebje.

1. Opis

Zaklepni komplet za punkcijo Renodrain in Magnusson s »pigtaik katetrom za perkutano nefrostomijo

2. Vsebina v embalaži

- kateter za nefrostomijo
- Schüllerjeva vodilna žica
- mandren ali obturator
- univerzalni adapter
- zamašek za kateter
- 2- ali 3-delne punkcijske igle
- dvojna embalaža in navodila za uporabo

3. Namenska uporaba

Perkutan pretok urina iz ledvic.

4. Indikacije

Opozorila: Pred določitvijo indikacije za perkutano nefrostomijo uretalnega stenta je treba najprej ugotoviti, ali je urinarno obstrukcijo možno ustrezno obvladati z uporabo notranjega uretalnega stenta.

Diagnosčne indikacije:

- anterogradna urografia in ureteroskopija
- odvzem materiala za preiskave (histologija, citologija, mikrobiologija)
- urodinamične meritve v zgornjem urinarnem traktu
- determinacija ledvične funkcije

Terapevtične indikacije:

- dekomprezija v primeru obstrukcijske upravljivosti zgornjega urinarnega trakta
- pretok urina v primeru uretalne fistole
- prvi korak proti anterogradnim manipulacijam v zgornjem urinarnem traktu (uretralna opornica, uretralna embolizacija, PNL, laserska terapija, ureterotomija)

5. Kontraindikacije

- koagulacijske motnje
- hudo vnetje
- dermatološka obolenja okoli mesta punkcije
- deformirane ledvice
- huda ukrivljenost hrbitnice

Do kontraindikacij pride zaradi omejitve za ustrezne osnovne aplikacije.

6. Morebitni stranski učinki

krvavitev, vaskularne lezije, izguba parenhima, hematurija, okužba (napredovanja), bolečina na mestu operacije, bolečina v povezavi s pomanjkanjem prolivodnje urina, perinefrična ekstravazacija in bakteriemija.

7. Navodila

Pri uporabi tega izdelka je treba upoštevati pravila splošne higiene, ki veljajo za kateterizacijo.

Priprava, skladitev in anestezija pacienta:

- Nadzorovani pogoj na oddelku, sterilni pogoj pri umivanju in sterilna prevleka tako kot za odprtjo operacijo ali PNL.
- Pacient v trebušnem položaju na mizi.

- Anterogradni PNS, običajno v lokalni infiltracijski anesteziji ali (v primeru retrogradnega PNS ali podaljaljene posuge v perkutano operaciji) regionalna anestezija ali intubacijska anestezija, odvisno od trdoživosti pacienta in izkušenj kirurga.

Tehnična izvedba:

Navodila (priprava za tehniko z enim korakom)

Opozorila: Osljivenje konice kanile ne smete uporabiti za raztegovanje repka (»pigtaik«), saj lahko tako poškodujete ali prebodeote notranjost katete.

1. Repek raztegne v raztegovnem ovitku na katetu.

2. Zamenjajte notranji del kanile z mandrenom in ga vstavite v kateter, dokler se ne dosegnete priključka luier-lock.

3. Privlje skupaj spon kanile.

4. Odstranite raztegovni ovitek skozi konico katete.

5. Ponovno odstranite mandren in ga zamenjajte z notranjim delom kanile.

6. Kateter je zdaj pripravljen za uporabo.

Tehnična izvedba tehniki v enem koraku:

- Lokalizacija ledvičnega/renalnega mehu pod ultrazvokom ali rentgenom.

- Natančna prva punkcija na posteriorni aksilarni liniji pod rebriškim lokom v smeri spodnjega laterálnega renalnega oboda.

- Po punkciji preverite, ali je bilo ledvični meh dejansko preboden, tako da odstranite notranji del kanile (indikator: urin izteka).

- V nasprotnem primeru iglo še enkrat vstavite v ponovno preboden.

- Potem ko ste uspešno prebodili ledvični meh, kanilo izvlecite iz katete in počakajte, da se kateter izprazni. Kateter prevzame svojo vnaprej določeno obliko repka, ko odstranite kanilo.

- Pridrite kateter na kožo s šivo.

Navodila za uporabo

Komplet za direktno punkcijo pri nefrostomiji Renodrain in Magnusson

IFU Nr.14-C Direktpunktion SL 08/12.04.2017

Navodila (tehnika v dveh korakih)

1. Repek raztegne v raztegovnem ovitku na katetu.
2. Vstavite obturator, odstranite mandren, privite skupaj priključek luier-lock.
3. Odstranite raztegovni ovitek skozi konico katete.
4. Kateter je zdaj pripravljen za uporabo.

Tehnična izvedba tehnike v dveh korakih:

- Lokalizacija ledvičnega/renalnega mehu pod ultrazvokom ali rentgenom.
- Natančna prva punkcija na posteriorni aksilarni liniji pod rebriškim lokom v smeri spodnjega laterálnega renalnega oboda.
- Vodilno žico s prožno konico vstavite v ledvični meh.
- Namestitev odvajalnega katetea z uporabo stalne žice.
- Preverjanje položaja katetea s slikanjem s kontrastnim sredstvom.
- Odstranitev vodilne žice in mandrena, ko dosežete točno namesteve.
- Distalni konec katetea prevzame svojo vnaprej določeno obliko repka (»pigtaik«).

Priravnitev katetea s kožnim šivom.

Zaklepni rep Magnusson

Opomba: Za vvod olejne tehniko v dveh korakih

- Potem ko namestite kateter, žico počasi povlecite nazaj in hkrati vlecite premični priključek zaklepnega »pigtaik« sistema Magnusson v smeri fiksnega priključka ter zasukajte, da ju zamenjete skupaj. Na ta način se repek vrnite v ledvico.
- Opomba: Za varno pridrtite prostega konca šiva na kateter, je priporočljivo, da premični priključek zasukate za 360°.
- Za sprostitev repka zasukajte spoj še bolj v desno in ponovno potisnite premični priključek proti telesu.

8. Morebitni zapleti in/ali tveganja

- Zaradi vzboda v steni ledvice lahko pride do hematurije.
- Nepravilna punkcija.
- Zaradi inkrustacije, strevjanje krvi v zanku in katetu lahko pride do delne ali popolne obstrukcije suprapubicnega katetea z nevarnostjo okužene hidronefrose in v izrednih primerih urosepsije.
- Disklokcija katetea.
- Puščanje urina prek kanala za nefrostomijo po odstranitvi katete.
- S tehniko v enim koraku povrjavljajte položaj katetea pomeni nov vzbod.
- Nevarnost perforacije ledvice in ledvičnega mehu.

9. Navodila za uporabo/previdnostni ukrepi

- Izdelok je sterilen le v primeru, da je embalaža nepoškodovana in zaprta.
- Samo za enkratno uporabo! Izdelka ne uporabljajte ponovno, ga ne reciklirajte oz. znova sterilizirajte. Ponovna uporaba, reciklacija ali ponovna sterilizacija lahko ogrozi struktorno celovitost instrumenta in/ali povzroči okvaro instrumenta, kar lahko pride do bolezni, poškodbe ali celo smrti pacienta.
- Pred uporabo je treba v celoti pregledati vse sestavne dele, ali so skladni in celoviti.
- Izdelkov ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti.
- Izdelka in sestavnih delov kompleta ne brišite z alkoholom/dezinfeckjskimi sredstvi. S tem lahko poškodujete površino.
- Ne poškodujte katetea z ostriimi kirurškimi instrumenti – to poveča tveganje za zlom.
- Vodilna žica se lahko poškoduje zaradi nenadzorovanega potiskanja ali vlečenja čez toge, ostre robove, pri čemer se odstrani plastična prevleka.
- Osljivenje konice kanile (tehnika v enim koraku) ne smete uporabiti za raztegovanje repka (»pigtaik«), saj lahko tako poškodujete ali prebodeote notranjost katete.
- Igla se lahko upogne zaradi prevelike moči med punkcijo. Iglo lahko stabilizirate s podporo ali pritrditvijo na predel punkcije, s čimer lahko preprečite upogibanje ali pribeganje.
- Redno pregledujte, ali kateter učinkovito odvaja in kako je nameščen.
- Kateter mažite samo z vodotopnimi mazivi. Ne uporabljajte maziv na osnovi petroleja.
- Kateter je treba zamenjati po 30 dneh.

10. Interakcija z drugimi zdravili

Barva katetea se lahko spremeni zaradi sočasnega jemanja zdravil, ki vsebujejo sredstva za zaznavanje urina s pomočjo barvila ali celo zaradi stika z urinom.

11. Transportni pogoji in pogoj skladitevna

Izdelke lahko prevažeate in skladite sami v embalaži, ki je za to namenjena. Za transport ni dodatnih posebnih zahtev.

Izdelki morate hraniti na suhem mestu in jih zaščititi pred neposredno sončno svetlobo, temperaturo pa naj bo 5–30 °C.

12. Odstranjevanje

Po uporabi ta izdelek lahko predstavlja bioškočno tveganje. Ravnanje z izdelkom in odstranjevanje morata biti skladna z uradnimi medicinskim postopki, upoštevati pa je treba veljavne pravne predpise in smernice.

Technična izvedba tehniki v enem koraku:

- Lokalizacija ledvičnega/renalnega mehu pod ultrazvokom ali rentgenom.

- Natančna prva punkcija na posteriorni aksilarni liniji pod rebriškim lokom v smeri spodnjega laterálnega renalnega oboda.

- Po punkciji preverite, ali je bilo ledvični meh dejansko preboden, tako da odstranite notranji del kanile (indikator: urin izteka).

- V nasprotnem primeru iglo še enkrat vstavite v ponovno preboden.

- Potem ko ste uspešno prebodili ledvični meh, kanilo izvlecite iz katete in počakajte, da se kateter izprazni. Kateter prevzame svojo vnaprej določeno obliko repka, ko odstranite kanilo.

- Pridrite kateter na kožo s šivo.

LT

Naudojimo instrukcijos

Renodrain ir Magnusson nefrostomijos tiesiogiņes punkcijos rinkinys

IFU Nr.14-C Direktpunktion LT 08/12.04.2017

Atkrepkite dēmesi. Šī medicīnīj gamīnī jsigyi ir naudoti gali tik apmokytas medicīnīs personāls.

1. Apraksts

Renodrain ir Magnusson užrakto punkcijos rinkiniai su kialūs uodegos formos kateteriu, skirti perkutānai nefrostomijai.

2. Turīns ir pakuočē

- Nefrostomijos kateteris
- Schüller tipo krepijamasis laidas
- Šerdis ar obturatorius
- Universalis adapteris
- Kateterio kaiši
- 2 ar 3 dalībų priekšinės adatas
- Dviguba pakuočē ir naudojimo instrukcijos

3. Pakirtis

Perkutānai šlapimo nukreipimas iš inksto.

4. Indikacijos

Pastaba. Pries nustatant perkutānai nefrostomijos indikacijas, pirmiausia turėt būti nustatyta, ar galima šlapimo takų obstrukciją tinklemai pašalinti naudojant vidinių šlapimtakio stentą.

Diagnostinės indikacijos:

- Anterogradinė pirografija ir ureteroskopija
- Tyrimo medžiagos rinkimas (histologija, citologija, mikrobiologija)
- Viršutinio šlapimo trakto urodiņinės matavimai
- Inkstu funkcijos nustatymas

Terapinės indikacijos:

- Dekompresija vėjučių obstruktiūvas uropatijas gadijumos
- Urīna izvadėsana išvadėsana išvadėsana gadijumus
- Pirmais solis ceļā uz anterogradām manipulacijām augšėjos urīncelos (urīnada stentēšana, urīnada embolizacija, PNL, arštēšana ar lázeru, ureterotomija)

5. Kontraindikacijos

- Kreislojūni sutrikimai
- Rūmatis uždegimas
- Dermatologiniai susirygimai aplink priekšinės adatas
- Inkstu deformacija
- Rūmatis stuburu išlinkimas

Kontraindikacijos yra susijusios su aprībojimais naudoti pagal atitinkamas pagrindines paskirtis.

6. Galimi šalutiniai poveikiai

Kraujavimas, kraujagyslių pažaidos, parenchimos paradimas, hematurija, infekcija (kytančios), skausmas punkcijos vietoje, su šlapimo neišskrymu susijęs skausmas, pernefinė ekstravazacija ir bakteriemija.

7. Instrukcijos

Naudojant šį gaminių būtinā laikytis kateterizacijai taikyti bendrijų higienos taisykių.

Paruošimas, saugojimas ir paciento anestezija:

- Kontrolluojamas salgyjų palatoje, pilnais salgyjais, išskaitant plovimą ir sterilių dangu, kaip atviro operacijos ar PNL atveju
- Pacientą paguldytu pilvū žemyn ant asto
- Atlikiant anterogradinę PNS, paprastai taikoma vietas infiltracine anestezija, o atlikiant retrogradinę PNS ar intervenciją papildant perkutānai operacijai, taikoma regioninė