

RO

Set de punționare și schimb pentru drenarea suprapubiană a vezicii urinare
SUPRA FIX

Instrucțiuni de utilizare pentru SUPRA FIX

HU

Punkciós és cserekészlet
suprapubicus húgyhólyag drénezéshez
SUPRA FIX használati utasítás

SL

Komplet za punkcijo in zamenjavo
za suprapubicno drenažo mehurja
Navodila za uporabo za SUPRA FIX

SK

Súprava na punkciu
a výmenu suprapubického
katétra močového mechúra
Návod na použitie pomôcky SUPRA FIX

LT

Punktuotos ir pakeiciamasis rinkinys
viršgakiniam šlapimo išeidimui
SUPRA FIX naudojimo instrukcijos

LV

Suprapubikālās urīnpūšā drenāžas
punkcijas un nomaiņas kompleks
SUPRA FIX lietošanas norādījumi

IFU Nr. 02-C

Instrucțiuni de utilizare pentru SUPRA FIX

Set de punționare și schimb pentru drenarea suprapubiană a vezicii urinare

IFU Nr. 02-C Suprafix_RO_03/07.07.2017

Retinere: Acest produs medical poate fi obținut și utilizat doar de personal medical pregătit.

1. Descriere

Set de punționare și schimb pentru drenarea suprapubiană a vezicii urinare SUPRA-FIX cu/fără balon.

2. Conținutul setului și ambalajul

- Cateter suprapubian
- Canulă divizată (doar pentru seturi de punționare!)
- Dilatator cu teacă divizată (doar pentru seturile de schimb cu dilatare)
- Mandrină fabricată din oțel inoxidabil de uz medical (pentru cateter cu mandrină tubulară)
- Fir de ghidare, acoperit cu teflon sau din oțel (set de schimb)
- Colier (nu pentru catetere cu balon)
- Dop cateter
- Instrucțiuni de utilizare

3. Destinație

Drenarea suprapubiană a vezicii.

4. Indicație

- Echilibrarea excreției de urină
- Drenarea intraoperatorie și postoperatorie a urinei
- Afecțiuni de golire a vezicii urinare
- Pentru prostată sau epididimă acută cu afecțiune de golire a tractului urinar
- Tratamentul precoce pentru leziunile uretrei

5. Contraindicații

- Vezică urinară contractată
- Arsuri sau cicatrizare la nivelul prevezical sau suprasimfizei
- Ileus (obstrucție intestinală)
- Meteorism (de exemplu, hiperinfilație intestinală)
- Sarcină
- Obezitate
- Insuficiență renală
- Tumoră în abdomenul inferior sau vezica urinară
- Macrohematurie crescută și tendință de hemoragie
- Boli de piele în regiunea de punționare

Alte contraindicații rezultă din restricții pentru aplicația de bază corespunzătoare.

6. Efecte secundare

Nevoie de a urina, iritate cauzată de corp strâin în vezica urinară, macrohematurie legată de punționare, iritație cutanată în regiunea de punționare, infecții

7. Instrucțiuni

Punționarea trebuie efectuată sub ghidare cu ultrasunete.

Cerinte pentru punționare:

- Asigurați unei vezici urinare umplute suficient. Dacă vezica urinară nu este umplută suficient, aceasta trebuie umplută utilizând un cateter transuretral.
- Determinați locului punționării, pe linia mediană a abdomenului inferior, aprox. 2 cm deasupra simfizei. Evitați deviația punționării laterale!
- Dezinfecția chirurgicală a pielei
- Anestetic local

Execuția tehnică a punționării:

- Conectați cateterul la o pungă de colectare a urinei. Introduceți cateterul în canula divizată până la primul marcuș și demonstrați protecția canulei.
- Înainte de a efectua punționarea, în piele trebuie efectuată o incizie cu bisturii.
- Utilizând o canulă divizată pregătită, vezica urinară este perforată la aprox. 2 cm deasupra simfizei, perpendiculară pe peretele abdominal.
- Introduceți cateterul prin canulă în vezica urinară până la marcajul al 2-lea.
- IMPORTANT:** Din acest moment cateterul nu mai trebuie tras înapoi în mansoan, altfel acesta poate fi tăiat de canula ascuțită și după ce cateterul a fost pozitionat, nu îl mai mișcați.
- **Pentru cateter cu balon:** Umpleți balonul cu cantitatea recomandată de lichid (a se vedea eticheta).
- **Pentru cateter fără balon:** Ataşați cateterul pe piele cu ipsos de fixare.
- Retrageți canula din canalul de punționare în sus până la ălașamentul cateterului.
- Desprindeți canula separând prinderile în laterală și în jos în același timp.

Execuția tehnică a punționării (cateter cu balon cu mandrină tubulară):

- Punționarea și introducerea firului de ghidare cu un vârf flexibil.
- Retinere:**
Înainte de utilizare, trebuie aplicat un lubrifiant adecvat pe mandrină tubulară. Apoi, mandrina tubulară este introdusă în axul cateterului cu balon.
- Poziționarea cateterului cu balon cu ajutorul unui fir de ghidare introdus permanent.
- Extragețe mandrinei tubulare din cateterul cu balon.
- Scoateți firul de ghidare după obținerea poziționării exacte.
- Umpleți balonul cu cantitatea recomandată de lichid (a se vedea eticheta).

10. Interacțiunea cu alte medicamente

Cateterul se poate decolora din cauza administrației concomitente de medicamente sau ca rezultat al contactului cu urina.

11. Condiții de transport și depozitare

Produsele pot fi transportate și depozitate doar în ambalajul coresponzător. Nu există alte cerințe specifice pentru transport.

Produsele trebuie depozitate înt-un loc uscat și protejat de lumina solară directă, înt-un interval de temperatură de 5 - 30 grade Celsius.

12. Eliminare

După utilizare, acest produs poate prezenta un pericol biologic. Manipularea și eliminarea trebuie efectuate în conformitate cu procedurile medicale recunoscute și efectuate conform reglementărilor legale și îndrumărilor aplicabile.

SK

Návod na použitie pomôcky SUPRA FIX

Súprava na punkciu a výmenu suprapubického katétra močového mechúra

IFU Nr. 02-C Suprafix_SK_03/07.07.2017

Poznámka: Tento zdravotníky výrobok môžu získať iba vyškoleni zdravotníci pracovníci.

1. Popis

Súprava SUPRA-FIX na punkciu a výmenu suprapubického katétra močového mechúra s balónikom/bez balónika.

2. Obsah a balenie súpravy

- Suprapubický katéter
- Delená káryla (len pri súpravách na punkciu)
- Dilatator s deleným puždom (len pri súpravách na dilatačnú výmenu)
- Mandrin vyrobený z medicinskej nerezovej ocele (len pri katétoch s dýtum mandrónom)
- Vodiaci dýtum potiahnutý teflónom alebo oceľový (súprava na výmenu)
- Svorka (nie pri balónikových katetroch)
- Zátka katétra
- Návod na použitie

3. Určenie použitia

Suprapubická katetORIZÁCIA močového mechúra.

4. Indikácie

- Vyváženie vylúčovania moču
- Odvádzanie moču počas operačných zákrokov a po nich
- Poruchy vyprázdňovania močového mechúra
- Pri akutnej prostatitíd alebo epididimitíde s poruchou vyprázdňovania močových ciest
- Prvotné vyšetrenie pri poranieniach močovej rúry

5. Kontraindikácie

- Zmenený močový mechúr
- Preveľkúle alebo suprapubické zjazvenie alebo popáleniny
- Ileus (neprichodenie črevov)
- Meteorizmus (apr. črevná hyperinfilačia)
- Gravidita
- Obezita
- Objektívna nedostatočnosť
- Tumor v podbruskú alebo močovom mechúre
- Väčšie množstvo krvi v moči a sklon ku kvracaniu
- Kožné ochorenia v mieste punkcie

Další kontraindikácie vyplývajúce z obmedzení pre príslušné základné aplikácie.

6. Vedľajšie účinky

Nutkanie počasie, podráždenie cudzim telosom v močovom mechúre, makrohematuria súvisiacas s punkciou, podráždenie kože v oblasti punkcie, infekcie

7. Pokyny

Punkcia by sa mala vykonávať pod ultrazvukovou kontrolou.

Požiadavky na výplň:

- Overte, či je močový mechúr dostatočne plný. Ak nie je mechúr dostatočne plný, je potrebné ho naplniť pomocou transuretrálneho katétra.
- Stanovenie miesta punkcie – na medianej líniu podbrusky, približne 2 cm nad lonovou sponou. Dobjite to, aby nedošlo k laterálnejmu vychýleniu punkcie.
- Chirurgická dezinfekcia pokožky
- Lokálna anestézia

Technický postup pri punkcii:

- Pripojte katéter k vrecku na odber moču. Zasuňte katéter „do delenej káryla po 1. značke“ a odstraňte ochranu káry.
- Pred vynášaním punkcie je potrebné narezat kožu skalpelom.
- Pomocou prípravenej delenej káry sa prepichne močový mechúr približne 2 cm nad lonovou sponou v súveru kolom na brušnú stenu.
- Zasuňte katéter ke kárylu do močového mechúra po 2. značku.

DÔLEŽITÉ: Katéter sa od tohto momentu nesmie vtahoval späť do puzdra, pretože by sa možno priezerať na ostriej káryle, a to umiestnení na katétron už nesmie pohybovať.

- **Pri katétri s balónikom:** Napíšte balónik predpísaný objemom tekutiny (pozri štítk).- **Pri katétri bez balónika:** Pripevnite katéter ku koži fixačnou náplastou.

- Vytiahnite kárylu z punkčného kanála až po pripojenie katétra.

- Rozložte kárylu sučasným potiahnutím či užívajte dostráňanie do strán a dole.

Technický postup pri punkcii (balónikový katéter s dýtum mandrónom):

- Punkcia a zavedenie vodiaceho dýtua s hybným koncom.

- Poznámka:

Pred použitím naneste na dýtum mandrón vodivý lubrikant. Potom možno zasunúť dýtum mandrón do dierky balónikového katétra.

- Umiestnenie balónikového katétra pomocou zabudovaného vodiaceho dýtua.

- Vytiahnite dýtum mandrón z balónikového katétra.

- Odstráňte vodiaceho dýtua po dosiahnutí presného umiestnenia.

- Napíšte balónik predpísaný objemom tekutiny (pozri štítk).

Výmena katétra:

- Odblokujte balónik (pri balónikom katétri) alebo odpojte (pri katétri bez balónika).

- Pri ohyniom konci zasúte výmenný dýt do močového mechúra cez rovnaký zabudovaný katéter za súčasného narovnania katétra do čo najvornejšieho tvaru.

- Vytiahnite katéter z močového mechúra pomocou zabudovaného výmenného dýtora.

- Zasúňte katéter do močového mechúra pomocou zabudovaného výmenného dýtora.

- **Katéter s balónikom:** Napíšte balónik predpísaný objemom tekutiny (pozri štítk).- **Pri katétri bez balónika:** Pripevnite katéter ku koži fixačnou náplastou.

Osobitné pokyny k použitiu súprav so slúčkou na dilatačnú výmenu:

Pri zasúvaní balónikového katétra prostredníctvom deleného puzdra intubátoru musí byť katéter narovnaný pomocou vodiacieho dýtora!

8. Možné komplikácie a alebo riziká

- Preplňovanie cievok v stene močového mechúra môže viesť k hematúrii.

- Príliš rychlá katetORIZÁCIA nadmerne rozšíreného močového mechúra môže mať za následok kvracanie steny mechúra. (KatetORIZÁCIA močového mechúra vykonávajte postupne.)

- Dlhodobá katetORIZÁCIA môže viesť k zniženej kapacite močového mechúra.

- Infekcie

- Inkruštácia

- Zmena polohy katétra

9. Vystrahy/bezpečnostné opatrenia

- Tento výrobok je sterilný iba v prípade, ak je balónik nepoškodený a nekontaminovaný.

- Určené len na jednorázové použitie! Nepoužívajte opakovane, nerecyklykujte ani nesterilizujte opakovane. Opakovane používanie alebo opakovane sterilizácia môžu znížiť štruktúrnu integritu zariadenia a/alebo môžu viesť k nesprávnej funkciu zariadenia, čo môže spôsobiť ochorenie, poranenie alebo smrť pacienta.

- Výrobky nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.

- Neuterajte výrobok alkoholom/dezinfekčným prostriedkom/lubrikantmi. Mohol by sa poškodiť povrch.

- Pred použitím je nutné skontrolovať kompatibilitu a integritu všetkých súčasti.

- Na punkcioi sa máta zložit' najmenšia možná punkčná káryla.