

ES

Instrucciones de uso

Conjuntos de stents uretrales controlables y no controlables

IFU Nr. 01-A Endo-J ES_03/03.04.2018

Atención: Estos productos médicos deben ser adquiridos y utilizados exclusivamente por el personal médico especializado.

- Denominación**
Stents uretrales con doble J y conjuntos de stents para desvío urinario.
- Contenido y embalaje**
- Stent ureteral o
- stent tumoral (con espiral metálico o de una hoja dura con pigtais blandos)
- Alambre guía (revestido de PTFE)
- Empujador o unidad de control (para los conjuntos controlables)
- Pinza del ombligo (solo para stents uretrales con punta cerrada)
- Campos de aplicación**
Los stents uretrales deben garantizar el desvío urinario del riñón a la vejiga, evitar la extravasación de la orina o estabilizar el uréter.

- Indicaciones**
- Colocación del stent del uréter pre- y postoperatorio
- Drenaje urinario, incluso en el embrazo.
- Drenaje urinario de seguridad profiláctico o postoperatorio tras ureteroscopia
- Contrarrestar contracciones, además de lúmenes de cisticistas tras lumen del uréter o lumen en el orificio
- Esterosia uretral de varias etiologías
- Estructuras uretrales, estenosis, dolores o adhesiones
- Compresión del uréter debido a tumores y otros procesos que requieran espacio alrededor
- Postoperatorios, p. ej. tras cirugía pélvica renal o ureterotomía
- Contraindicaciones**
- Infecciones graves
- Obstrucción prolongada
- Microvejiga o vejiga espástica
- Fistulas de vejiga
- Urosepsis
- Incontinencia urinaria
- Retención urinaria crónica u obstrucción extrínseca
- Potenciales efectos secundarios**
- Irritación de la vejiga y zonas reales por cuerpo extraño
- Erosiones y ulceraciones del uréter
- Disuria
- Hematuria
- Frecuencia elevada de micción, micción nocturna frecuente
- Sensación de presión en el costado, dolor en el costado
- Reflujo vesico-ureteral
- Incrustación
- Infecciones ascendentes
- Instrucciones**

Conjuntos no-controlables

- Colocación del stent ureteral cerrado del lado renal:
- Introduzca el alambre guía con el extremo rígido en primer lugar para abrir el lado de la vejiga.
 - Con ayuda de la pinza, fije el stent ureteral tensado sobre el alambre guía.
 - Introduzca el stent ureteral por el canal de instrumento del cistoscopio. Tras llegar al canal de trabajo, se debe quitar la pinza del ombligo.
 - Donde el orificio y, bajo guía radioscópica, lleve el stent ureteral hasta alcanzar la pelvis renal.
 - Después de emplazarlo correctamente en la pelvis renal, retire el alambre guía y sumerja el stent ureteral en la vejiga con ayuda del empujador. A continuación, extraiga cuidadosamente el empujador del cistoscopio.

Stent ureteral bilateralmente abierto

- Haga avanzar el alambre guía con la punta flexible hacia delante hasta la pelvis renal pasando por la obstrucción.
- Bajo guía radioscópica, utilice el empujador para deslizar el stent ureteral por el alambre guía hasta introducirlo en la pelvis renal.

- c) Cuando el extremo distal del stent ureteral haya alcanzado la pelvis renal, deje de deslizar el stent ureteral. El alambre guía se retirará mientras el empujador mantiene el stent ureteral en posición. Una vez extraído el alambre guía, sumerja los pigtais del stent ureteral.

- (d) Con el extremo rígido hacia delante, empuje el alambre guía por la abertura del medio del haz del pigtail del lado de la vejiga, estríndalo. Empuje la parte extendida del stent dentro de la vejiga a través de la abertura de la ureterotomía.
- e) Retire el alambre guía e introduzcalo de forma análoga en el pigtail por el lado del riñón.
- f) Avance el pigtail extendido del lado del riñón dentro de la pelvis renal a través de la abertura de la ureterotomía.
- g) Tras extraer el alambre guía y comprobar que el stent está en la posición correcta, suture el uréter.

Conjuntos esterilizables

- | Tipo 1 | Tipo 2/Visionmatic | Dirigente |
|---|--------------------|-----------|
| 1. Inserción del alambre guía (solo para stents abiertos) | | |
- Empuje el alambre guía hacia el interior de la pelvis renal. Evite cualquier doblez o formación de curvas de la vejiga al hacerlo. Humedezca previamente el alambre guía hidratándolo. En caso de alambres con un núcleo móvil, el núcleo del alambre guía se puede rotar, recordando que la punta sea flexible.

2. Colocación del stent y la unidad de control

- a) stents abiertos:
La unidad de control y los stents uretrales ya están preconectados. Inserte ambos en el alambre guía permanente.

- Atención: El stent ureteral no debe desconectarse de la unidad de control antes de usarse, puesto que después no es posible volver a conectarlo.

b) stents cerrados

- Empuje el alambre guía hacia delante hasta que el pigtail se haya extender. Si el alambre guía queda estrechado, utilice el empujador para expandirlo (adaptador Tuchy Borst o pinza de acoplamiento). Si se usa un alambre con núcleo móvil, la flexibilidad de la punta se puede ajustar de forma individualizada (con tamaños FR6 y 7).

3. Inserción en el trácto urinario	
Inserte lentamente el sistema conectado por el orificio en el uréter a través del canal de instrumento y colóquelo en la pelvis renal.	
4. Posicionamiento correcto del stent ureteral	
Retire el alambre guía lo suficiente para que el pigtail se desarrolle, mueva el stent ureteral adelante y atrás y girelo para colocarlo en la posición deseada. También se puede mover el catéter con movimientos giratorios y axiales.	
5. Liberación de la fijación y extracción del alambre guía	
Tras corregir la colocación del stent, suelte la pinza de acoplamiento del adaptador en Y o la fijación en el soporte y retire el alambre guía.	
6. Desconexión	
Deslice el tubo exterior contra el tubo interior [Tipo II: Libere el desconector del empujador y empújelo hacia el stent ureteral, Visonmatic: Sujete el asa (roja) y gire la punta (azul) hacia la izquierda como muestran las flechas.]	Retire la protección y empújelo el soporte.

Extracción de un stent ureteral

- a) Inserte el cistoscopio hasta la vejiga.

- b) Inserte los forceps en el canal de trabajo del cistoscopio y sujetel el stent ureteral con los forceps. A continuación, se extrae todo del cuerpo.

8. Posibles complicaciones y/o riesgos

- Deslocación del stent ureteral.
- Fragmentación del producto con la consiguiente extracción quirúrgica o endoscópica
- Incrustación y atascamiento del stent ureteral, que lo hace no funcional y que puede provocar la formación de cálculos urinarios en el riñón.
- Fistulas uretero-arteriales en pacientes con reconstrucción vascular y stents en casos de uréter.
- Al empujar el stent ureteral hacia delante con el alambre guía se puede dañar el uréter.
- Si se retira y se vuelve a extender el alambre guía, se puede provocar la salida de la punta de este a través de los orificios del stent ureteral y causar daños en la zona del uréter.
- Si se desliza el stent usando el empujador con demasiada fuerza, se pueden dañar las paredes de la vejiga.
- Como consecuencia de las obstrucciones en el uréter, no es posible deslizar el alambre guía dentro del riñón.
- Pueden darse contracciones como consecuencia de daños en el uréter.
- Las manipulaciones con el alambre guía pueden desencadenar espasmos uretrales.
- Daños en el tracto urinario al empujar la unidad de control hacia delante si el stent ya se ha retirado.
- Retraída prematura accidental o auto-aflojamiento del stent ureteral

9. Advertencias/Precauciones

- Este producto solo es estéril si se envíe no está dañado ni abierto.
- ¡No utilice el dispositivo si el paquete de esterilidad no es intachable!
- ¡No utilice el dispositivo si el paquete de esterilidad no es intachable!
- La reutilización o la reesterilización del instrumental pueden comprometer su integridad estructural y/o provocar un fallo en el mismo que, a su vez, puede resultar en una enfermedad, lesión o muerte del paciente.

- No utilice un producto cuya fecha de caducidad haya expirado.

- No utilice alcohol o desinfectantes para limpiar el producto ni los componentes del equipo. Esto puede dañar la superficie.

- Compruebe la compatibilidad e integridad de todos los componentes antes de su uso.

- Al introducir el stent mediante el canal de trabajo del cistoscopio, se debe ajustar el tamaño del stent ureteral al canal de trabajo.

- No dañe los componentes del equipo con instrumentos quirúrgicos afilados, puesto que esto aumenta el peligro de rotura. No estire el stent en exceso antes de su utilización. Si se estira demasiado, aumentará el peligro de rotura.

- La extensión del stent en la forma en la que se suministra del pigtail son necesarias para reducir al mínimo el riesgo de una migración del stent. Esto se debe asegurar mediante técnicas de escopia radiológicas o basadas en medios de contraste.

- El aire en la parte inferior del abdomen del paciente podría impedir la visibilidad del stent ureteral en una prueba de rayos X.

- Los stents uretrales están aprobados para uso a largo plazo (> 30 días). Sin embargo, estos no son implantes permanentes. Por lo tanto, se recomienda controlar el estado de la orina, la posición del stent y la permeabilidad del stent ureteral mediante radiografías, métodos isotópicos y cistoscopia a intervalos regulares (al menos cada 3-4 semanas) para garantizar la detección temprana de cualquier infección, desplazamiento o atasco.

- En el caso de defectos extensivos en el uréter, deberá realizar una nefrostomía percutánea, puesto que si se hace avanzar el stent de forma aleatoria, existe el peligro de aumentar más cualquier lesión.

- Si se utiliza sutura en el lado de la vejiga, este deberá extraerse a los pocas días. La duración máxima de la sutura no debe exceder los 30 días. Antes de usarla, debe asegurarse que se puedan retirar fácilmente los puntos de sutura.

- Los exámenes por resonancia magnética no están permitidos en pacientes a los que se les ha implantado un stent ureteral.

- Es posible que no se pueda colocar este producto a pacientes con marcapasos, debido a su rango de metal.

- Empuje con cuidado el alambre guía y de forma controlada para evitar dañar el orificio, el uréter o el parénquima.

- El núcleo móvil del alambre guía se debe deslizar solo en posición recta.

- No se debe curvar ni empujar el núcleo móvil del alambre guía, puesto que podría perforarse la espiral de alambre.

- No siga empujando el alambre guía hacia delante tras la extracción.

- No siga empujando la protección si el stent ureteral se ha colocado correctamente.

- No utilice el producto si se observa que está dañado.

10. Reacciones cruzadas

- El catéter podría adquirir un color amarillento debido al uso concomitante de medicamentos o incluso como resultado del contacto con la orina.

11. Transporte y condiciones de almacenamiento

- Los productos deben ser transportados y almacenados únicamente en sistemas de embalaje previstos para ello. No hay más requisitos de transporte específicos.

- Los productos se deben almacenar en lugares secos y protegidos de la luz solar, en un intervalo de temperatura de 5 a 30 grados centígrados.

12. Eliminación

- Después de su uso, este producto puede suponer un peligro biológico. Se debe manejar y desechar en conformidad con la práctica médica aceptada y las disposiciones legales vigentes y la normativa de los países correspondientes.

13. Áreas de utilización

- Así como los stents uretrales devem asegurar un desvío urinario a partir do rim para a bexiga, impedir o extravasamento da urina ou fixar o uréter.

4. Indicaciones

- Protección del uréter no pós-operatório

- Drenagem urinária, mesmo durante a gravidez

- Segurança da drenagem urinária profilática ou pós-operatória após URS

- Neutralização de estenoses, também cisticistas de fissuras após fissuras no uréter ou fístulas

- Estenoses uretrales de variada etiología

- Estenoses uretrales, estenoses, torção, ou aderência

- Compresión do uréter devido a tumores e outros processos que necessitam de espaço

- Pós-operatório, por ex. após cirurgia do bacinetone renal ou ureterotomia

5. Contraindicaciones

- Infecciones graves

- Obstrucción completa

- Fístulas de vejiga espástica

- Fistulas na bexiga

- Septicemia de origem urológica

- Incontinência por urgência

- Retenção crónica da urina ou obstrução extrínseca.

6. Posibles efectos secundarios

- Irritación causada por cuerpos extraños en la vejiga y regiones reales

- Erosión y ulceración del uréter

- Disuria

- Hematuria

- Aumento da frequência de micção, urgência em urinar à noite

- Sensação de pressão nos rins, cólicas renais

- Refluxo vesico-ureteral

- Incrustación

- Infeções ascendentes

7. Instrucciones

Conjuntos no dirigíveis

Prótesis ureteral fechada del lado renal:

- a) Inserte el alambre guía con la punta rígida primera en la vejiga.

- b) Fixar la prótesis ureteral con la ayuda de la pinza de tensión no-fijo-guía.

- c) Inserir a prótese ureteral pelo canal de trabalho do cistoscópio. Após alcançar o canal de trabalho, a pinza naval deve ser removida.

- d) O estímulo y la prótesis ureteral es avanzada sobre controlo del estómago hidrofílico (Tuchy Borst o pinza de acoplamiento).

- e) Após a colocação correcta no bacinetone renal, retirar o fio-guía e introduzir a prótese ureteral na bexiga com a ajuda do propulsor. De seguida, retira cuidadosamente o propulsor do cistoscópio.

Prótesis ureteral abierta con ambos los lados:

- a) Avançar o fio-guía com a ponta flexible para a frente, passando ao lado da obstrução até ao bacinetone renal.

- b) Sob orientação radioscópica, empurrar a prótesis ureteral através do fio-guía com o propulsor pelo bacinetone renal.

- c) Ligar que a ponta distal da prótesis ureteral chegue ao bacinetone renal, não empurrar mais a prótesis ureteral. O fio-guía é removido, enquanto o propulsor mantiém a prótese ureteral em seu posição.