

RO

Stenturi ureterale în formă de J și catetere Websinger
Instrucțiuni de utilizare

HU

Mono-J uréter sztentek és
Websinger katéterek
Használati utasítás

SL

Enojni J-uretralni stenti
in katetri Websinger
Navodila za uporabo

SK

Močovodové stenty Mono-J
a katétre Websinger
Návod na použitie

LT

Viengubi J formos šlapimtakui
stentai ir „Websinger“ kateterai
Naudojimo instrukcijos

LV

Mono-J urinavada stenti
un Websinger katetri
Lietošanas norādījumi

IFU Nr. 28-C



Instrucțiuni de utilizare

Stenturi ureterale în formă de J și catetere Websinger

IFU Nr 28-C Mono-J RO 04/02.10.2017

Retinete: Acest produs medical poate fi obținut și utilizat doar de personal medical pregătit.

1. Descriere

Stenturi ureterale în formă de J și seturi de stenturi și catetere Websinger pentru deviere urinară.

2. Conținut și ambalaj**a. Stenturi ureterale în formă de J:**

- Stent ureteral în formă de J
- Fir de ghidare, acoperit cu Teflon™
- Adaptor

b. Stenturi ureterale în formă de J Magnusson:

- Stent ureteral în formă de J cu sistem de închidere
- Fir de ghidare, acoperit cu Teflon™
- Adaptor Luer Lock cu pâlnie

c. Cateter Websinger:**Websinger NEO:**

- 2 catetere
- 2 adaptore de canulă

Websinger:

- Cateter
- Trocar din plastic
- Adaptor

Ambalaj dublu și instrucțiuni de utilizare

3. Destinație

Drenaj urinar postoperator pe termen scurt după proceduri chirurgicale reconstructive exlineze.

4. Indicații**Cateter în formă de J și Websinger**

- Cistectomie radicală

- Drenaj urinar extern în cazul stenozelor ureterale manifeste (piurie, hematurie)
- Postoperator după transureterostomie
- Conduct ileal cu hidronefroză
- Urostomie

Set stenturi ureterale Websinger (NEO)

- Amplasarea stentului pentru drenaj supravezical după intervenții chirurgicale asupra neovescicării urinare.

5. Contraindicații

Infecții grave, infecție urinată

6. Reacții adverse posibile

- Infecție ascendentă
- Disurie
- Durere în flanc
- Hematurie
- Irritație cauzată de corp strâns în rinichi și vezica urinară
- Eroziuni și ulcerății ale ureterului

7. Instrucțiuni**a. Stenturi ureterale în formă de J****Vârf deschis:**

1. Introduceți firul de ghidare, cu vârful flexibil înainte, în pelvisul renal.

2. Sub ghidare fluoroscopică, impingeți stentul în formă de J în pelvisul renal prin firul de ghidare.

Vârf închis:

1. Introduceți firul de ghidare, cu capătul rigid înainte, în stentul ureteral în formă de J.

2. Fixați stentul ureteral în formă de J întins pe firul de ghidare cu ajutorul colierului.

3. Introduceți stentul ureteral în formă de J în cistoscop prin canalul de lucru. Atunci când colierul ajunge la deschiderea canalului de lucru, acesta trebuie scos.

4. Apăsați stentul ureteral în formă de J până la pelvisul renal sub ghidare fluoroscopică.

5. După poziționarea corectă în pelvisul renal, retrageți firul de ghidare.

b. Stenturi ureterale în formă de J Magnusson:

1. Acest produs este utilizat în conformitate cu procedura descrisă în secțiunea 7a.

2. După poziționarea cateterului, retrageți lantul fir și în același timp trageți conectorul mobil al sistemului de blocare în sensul conectorului fix și răsuștiți pentru a le bloca pe cele două imprenă. Astfel, spirala este fixată în siguranță în rinichi.

3. **Notă:** Pentru a atâsta în siguranță capătul liber al suturii la cateter, este recomandat să roțiți conectorul mobil cu 360°.

4. Pentru a elibera spirala, roțiți conexiunea mai mult la dreapta și apăsați conectorul mobil spre corp din nou.

- c. Cateter Websinger:**
 1. După spălarea ureterului, introduceți cateterul în ureter până când simții rezistență.
 2. Retrageți aproximativ 1 cm și apoi clătiți și aspirați cu ajutorul adaptorului de canulă.
 3. Poziția corectă a cateterului este asigurată atunci când ambi pași de mai sus pot fi realizati cu usurință.
 4. Fixați cateterul pe ureter cu ajutorul materialului de sură reabsorbabil rapid.
 5. Urina poate fi drenată cu ajutorul adaptorului de canulă și a adaptorului universal într-o pungebă de urină. Clătirea postoperatorie rămâne posibilă.

8. Complicații și/sau riscuri posibile

- Dislocarea stentului ureterului sau a cateterului.
- Fragmentarea produsului cu eliminarea chirurgicală sau endoscopică ulterioră a produsului.
- Incrustarea și blocarea produsului, care devine nefuncțional și formare posibilă de calcul urinar în rinichi.
- Deplasarea stentului ureteral înainte cu firul de ghidare poate vătăma ureterul.
- Retragerea firului de ghidare și deplasarea acestuia înainte din nou poate cauza lezarea vârfului firului de ghidare prin orificiu de stentul ureteral, cauzând vătămare în zona ureterală.
- Din cauza obstrucțiilor din ureter, firul de ghidare nu poate fi deplasat înainte în rinichi.
- Stricurile se pot dezvolta din cauza deteriorării ureterului.
- Manipulările firului de ghidare pot declanșa spasme ureterale.

9. Avertismente/Precauții

- Acest produs este steril doar dacă ambalajul este nedeteriorat și nedeschis.
- De unică folosință! A nu se reutiliza, reciclează sau resteriliza. Reutilizarea, reciclarea sau resterilizarea poate afecta integritatea structurală a instrumentului și/sau duce la defectarea instrumentului, care poate duce la imbolnăvirea, rănirea sau moarte pacientului.
- Nu utilizați produse după data de expirare a acestora.
- Nu stergeți produsul și compozițele setului cu alcool/agenti dezinfecțanți. Aceasta poate deteriora suprafața.
- Înainte de utilizare, toate compozițele trebuie verificate pentru compatibilitate și integritate.
- Atunci când introduceți stentul ureteral în formă de J prin canalul de lucru al cistoscopului, dimensiunea stentului ureteral trebuie regăsită la canalul de lucru.
- Evitați deteriorarea produsului cu instrumente chirurgicale ascuțite, aceasta crește riscul de rupere. Evitați întinderea excesivă a produsului înainte de utilizare. Întinderea excesivă crește riscul de rupere.
- Poziționarea corectă și formarea completă a spiralei sunt necesare pentru minimizarea riscului de dislocare. Aceasta trebuie confirmată prin radiografie.
- În prezența infecției tractului urinar, produsul poate deveni încrustat și blocat.
- Produsul este destinat pentru o durată de introducere permanentă și de 30 de zile.
- Nu utilizați un fir cu un diametru mai mare decât diametrul intern declarat al stentului.
- Deplasati firul de ghidare înainte cu atenție și într-un mod controlat pentru a evita deteriorarea ureterului sau a parenchimului.
- Inspectați stentul ureteral sau cateterul cu regularitate pentru permeabilitatea și poziționarea drenajului.

10. Reacții încrucisate

- Produsul se poate decolora din cauza administrației concomitente de medicamente sau ca rezultat al contactului cu urina.

11. Condiții de transport și depozitare

- Produsele pot fi transportate și depozitate doar în ambalajul corespunzător acestuia scop. Nu există alte cerințe specifice pentru transport. Produsele trebuie depozitate într-un loc uscat și protejat de lumina solară directă, într-un interval de temperatură de 5 - 30 ° grade Celsius.

12. Eliminare

- După utilizare, acest produs poate prezenta un pericol biologic. Manipularea și eliminarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu procedurile medicale recunoscute și conform reglementărilor legale și în drumărilor aplicabile în statul sau provincia respectivă.

HU

Használati utasítás

Mono-J uréter sztentek és Websinger katéterek

IFU Nr 28-C Mono-J HU 04/02.10.2017

Tudnia kell: Ez az orvostechnikai készüléket csak szakképzett egészségügyi személyzet szerezheti be és használhatja.

1. Leîrás

Mono-J uréter sztentek és sztent készletek és Websinger katéterek a vizelet elvezetéséhez.

2. Tartalom és csomagolás**a. Mono-J uréter sztentek:**

- Mono-J uréter sztent
- Vezeték drót, Teflon™-bevonattal
- Adapter

b. Magnusson Mono-J uréter sztentek:

- Mono-J uréter sztent zárócsőkkel
- Vezeték drót, Teflon™-bevonattal
- Luer-zárás adapter tölcserrel

c. Websinger katéter:**Websinger NEO:**

- 2 kateter
- 2 kanuladarptor

Websinger:

- Kateter
- Műanyag merevitő
- Adapter

Dupla csomagolás és használati utasítás

3. Használati rendeltek

Rövid távú műtét utáni húgymű drenázés kiterjedt rekonstrukciós sebészeti beavatkozások követően.

4. Javallatok**Mono-J és Websinger katéter**

- Radikalna cystectomy

- Kúlsú húgymű drenázés nyilvánvaló uréter sztenten által (pyuria, hematuria)

- Műtét utáni transureterostomiát követően

- Ileum conduit hydronephrosis

- Urosztómá

Websinger uréter sztent készlet (NEO)

- A szentet elhelyezése supravesicalis drenázéshez húgyműképzés után.

5. Ellenjavallatok**Súlyos fertőzés, urosepsis****6. Lehetséges mellékhatások****Felmenő fertőzés****Vizelező zavar****Lágyműkű járadalom****Hematuria****Idegen test irritálja a húgyműkötöt, illetve a vesét****Az uréter eróziója, illetve fekélje****7. Utasítások****a. Mono-J uréter sztentek****Nyílt vén:**

- 1. Juttassa a vezeték drótot merev végét helyezze be a Mono-J uréter sztentbe.

- 2. Rögzítse a vezeték a Mono-J uréter sztentet a vezeték drótára a szorítással.

- 3. Veszesse be a Mono-J uréter sztentet a vezeték drótára a szorítással.

- 4. Nyomja a Mono-J uréter sztentet egészen a vesemedencreig.

- 5. Miután megfelelően lehelyezte a vesemedencreig, húzza ki a vezeték drótát.

b. Magnusson Mono-J uréter sztentek

- 1. A termékét a 7a. pontban leí