

Reine Männersache: Mit Sicherheit
und Komfort durch inkontinente Zeiten

UROX[®] für größtmögliche Diskretion bei der Harnableitung



Ob Dranginkontinenz, Stressinkontinenz nach radikaler Prostatektomie oder TUR-P, altersbedingt neuropathische Blase oder medikamentöse Ursachen: Bei unkontrolliertem Harnverlust sorgt das wiederverwendbare Harnableitungssystem UROX[®] dafür, dass man die Blase eine Zeitlang einfach mal vergessen kann.

- Effiziente Alternative zu aufsaugenden Hilfsmitteln, Urinalkondomen und transurethralen Kathetern
- 4-teiliges System mit Urinal, Fixierunterhose, anatomisch geformten Urinbeutel im Stretch-Beinling und spezieller Reinigungslösung
- Anatomieangepasste Größen für Urinal, Unterhose und Beinling
- Einfaches Anlegen und höchster Tragekomfort
- Vermeidung von Harnwegsinfekten und Geruchsbildung
- Starter-Set über die gesetzliche Krankenkasse abrechenbar

UROX[®] gibt Männern Freiheit und Lebensqualität

Unabhängig von der Ursache der Harninkontinenz und egal wie jung oder alt ein Patient ist: Das UROX[®]-Harnableitungssystem ist leicht anzuwenden, bequem und sicher zu tragen, hautfreundlich und äußerst diskret. Drei Teile und eine Lösung sorgen dafür, dass sich kein Mann mehr vor unkontrolliertem

Harnverlust, sichtbaren Flecken auf der Bekleidung oder Geruchsbildung fürchten muss. UROX[®] kann problemlos den ganzen Tag über getragen werden. Einzige Voraussetzung ist, dass der Anwender seine Blase ohne signifikante Restharmenge entleeren kann.

Das UROX[®]-System

UROX[®] besteht aus vier Teilen: Dem flexiblen Urinal, in das der Penis eingelegt wird, mit angeschlossener Verlängerungsschlauch, der Unterhose zur Fixierung des Urinals, dem Stretch-Beinling mit integriertem Urinbeutel sowie einer speziell für dieses System entwickelten, hautschonend desinfizierenden Reinigungslösung.

Entwickelt für perfekte Funktion

Das aus flexiblem, sich der Körperform anpassendem Kunststoff bestehende Urinal liegt passgenau um den Penis – ähnlich einem Tiefschutz oder Suspensorium. Auf der Innenseite ist das Urinal mit einer elastischen, komfortablen Silikonmembran überzogen, die das Genital vor unangenehmem Druck schützt. Fixiert wird das Urinal mit der dazugehörigen schwarzen Unterhose, die gewährleistet, dass der vom Urinal ableitende Schlauch im richtigen Winkel geführt wird. Hierdurch ist das stauungsfreie Wasserlassen in sitzender Position problemlos möglich.

Der Schlauch mündet in den Beutel, der in den ergonomischen, am Unterschenkel zu tragenden Beinling aus hochwertigem Stretchmaterial integriert ist und auch in gefülltem Zustand sicher in Position bleibt. Der Hahn zum Entleeren des Beutels hat ein Sicherheitsventil gegen versehentliches Öffnen und bleibt unsichtbar unter dem Hosenbein verborgen. Das Design des Systems gewährleistet absolute Diskretion-. Es ist leicht an- und abzulegen.

Wichtig ist die individuelle Passform

Das UROX[®]-Urinal ist für eine individuell sichere Ableitung in vier Größen erhältlich. Um die richtige Größe und damit Passform herauszufinden, wird der Penisumfang bei relaxtem Zustand in der Mitte gemessen – am besten mit einem Maßband. Auch die Größe des Beinlings, den es in den Größen S, M, L und XL gibt, orientiert sich am Umfang der dicksten Stelle des Unterschenkels. Die Fixierunterhose steht in den klassischen Wäschgrößen bis XL zur Verfügung. Die spezielle UROX[®]-Reinigungslösung ist antibakteriell wirksam gegen geruchsbildende Keime und schützt zugleich das Material. So ist das UROX[®]-Harnableitungssystem bei sorgsamer Pflege immer wieder einsetzbar und unbegrenzt haltbar.



Schnelle Eingewöhnung

Anfänglich kann es sich ungewohnt anfühlen, in das Urinal zu urinieren. Doch das vergeht schnell, wenn sich nach den ersten Erfahrungen zeigt, wie sicher und rückstandslos der Harn abgeleitet wird. Auch das Gefühl für den Füllstand des Harnbeutels und den Umgang mit dem Ablassventil stellen sich in der Regel sehr schnell ein.

Jeden Tag einfach hygienisch und sicher vor Geruch

Die spezielle UROX® Reinigungslösung ist in zweifacher Hinsicht hoch effektiv: Zum einen desinfiziert sie effizient und bildet - im Gegensatz zu einer kurzzeitigen Sterilsituation - auf der Beschichtung von Urinal und Schlauch einen anhaltenden keimmindernden Film. Das ist wichtig, da die Konzentration von Bakterien im Intimbereich besonders hoch ist. Zum anderen ist das Liquid sanft zur Haut und enthält keine allergenen Substanzen. Bei regelmäßiger Reinigung mit der Reinigungslösung bleibt das Material intakt, und eine Geruchsbildung ist nahezu ausgeschlossen.

Einsatz im Liegen braucht etwas Übung

Stehen, gehen, sitzen – UROX® macht alles diskret mit. Einzige kritische Situation: Das System ist nur bedingt für die Verwendung im Liegen bzw. in der Nacht konzipiert. Denn der Harnabfluss in den Beutel muss immer sichergestellt sein. Im Liegen funktioniert das, wenn der Beutel sich unterhalb der Bettkante befindet und der Anwender auf der Seite liegt. Zum Schlafen sollte UROX® nicht angelegt werden.

Auch außerhalb der Inkontinenz: UROX® ist Partner in allen Lebenslagen

Nicht nur Inkontinenz lässt sich mit dem UROX®-System ausgezeichnet managen. Es gibt viele Situationen im Arbeitsleben oder in der Freizeit, die Männern ein Austreten über eine gewisse Zeit unmöglich machen. Etwa als Bus- oder LKW-Fahrer, als Arzt im OP, als Segelflieger oder Rollstuhlfahrer. Wenn es darauf ankommt, entspannt und souverän zu bleiben, wenn die Blase drückt, ist das UROX®-System ideal. Das gleiche gilt bei psychisch bedingten Entleerungsstörungen (Paruresis): Mit UROX® ist das Wasserlassen unverkrampft und unbeobachtet jederzeit möglich.

Vorteil gegenüber ableitenden Dauerkathetern

Das durch transurethrale Blasenverweilkatheter bestehende Risiko einer Harnwegsinfektion oder auch Verletzungsrisiko kann durch UROX® vermieden werden. Zudem bringt das System einen erheblich höheren Tragekomfort mit und kann vom Patienten eigeninitiativ nach Bedarf eingesetzt oder entfernt werden.

Ökonomisch und ökologisch günstig

Das UROX®-System ist materialbeständig und robust. Bei sachgerechter Pflege kann UROX® immer wieder verwendet werden. UROX® ist in der Anwendung deutlich angenehmer und sicherer als Latex- oder Silikon-Urinalkondome, deren Fassungsvermögen begrenzt ist, und deren Entfernung schmerzhaft sein kann. Inkontinenz-Vorlagen oder -Pants eignen sich bei geringem bis mäßigem Harnabgang und müssen dann für eine gute Hygiene schnell gewechselt werden. Aus ökonomischer und ökologischer Sicht spricht in inkontinenten Zeiten alles für das einfache Harnableitungssystem UROX®.



Für jeden Mann das passende System

UROX® Urinal



S Sichere Ableitung des Urins. Die Haut bleibt trocken. Einfach anzulegen und abzunehmen.

■ S 7 - 9 cm
■ M 8,5 - 10 cm
■ L 9,5 - 11 cm
■ XL 10,5 - 13 cm

Umfang / Ø	Produkt	Größe
7-9 cm / 25 mm	UX-1011	S
8,5-10 cm / 30 mm	UX-1012	M
9,5-11 cm / 35 mm	UX-1013	L
10,5-13 cm / 40 mm	UX-1014	XL

UROX® Fixierunterhose



S Unterhose mit speziell ausgeführter Öffnung zur korrekten Fixierung von Urinal und Schlauch.
 L
 XL Keine unbequemen Nähte auf der Rückseite.

Taille	Produkt	Größe
86-94 cm	UX-3111	S
92-100 cm	UX-3112	M
98-106 cm	UX-3113	L
104-112 cm	UX-3114	XL

UROX® Beinling

mit 600-ml-Beutel



S Hoher Tragekomfort.
 M Anatomisch geformt.
 L Unauffälliger Ablasshahn mit Sicherung gegen versehentliches Öffnen.
 XL

Wadenumfang	Produkt	Größe
29-33 cm	UX-2011	S
33-38 cm	UX-2012	M
37-42 cm	UX-2013	L
41-46 cm	UX-2014	XL

UROX® Reinigungslösung



Reinigungslösung gegen Keim- und Geruchsbildung.

250 ml

Starter-Set wird von den Krankenkassen übernommen

Beim Starter-Set befinden sich in einer Kulturtasche die Harnableitungssystem-Produkte in individueller Größe: Urinal, Beinling mit Urinbeutel, Fixierunterhose und 250 ml Reinigungslösung.

Abgerechnet wird über das Hilfsmittelverzeichnis:

Gruppe: 15 – Inkontinenzhilfen
 Ort: Harn-/Verdauungsorgane
 Untergruppe: 12 – Urinalbandagen
 Produkt: 15.25.12.1005 – Externes Harnableitungssystem UROX Starterkit,
 Art.-Nr. UX-4017-XXX

Wir sind Uro-Spezialisten und Ihr verlässlicher Partner, wenn es um optimalen Anwender- und Patientenkomfort geht. Fragen Sie uns, und wir bieten Ihnen das für Ihren Bedarf beste Produkt an.

UROVISION GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5
 D-83101 Rohrdorf/Achenmühle
 Telefon: +49 (0) 8032 - 973-410
 Fax: +49 (0) 8032 - 973-411
 E-Mail: kundenservice@urovision.de
 www.urovision-urotech.de