

## Anleitung zur Befestigung eines URELIA® Urinbeutels

Folgende Anleitung ist für die URELIA® Urinbeutel UVD-7550, UVD-5050, UVD-3K75 und UVD-1030/60/90 anwendbar.



Zur Befestigung eines Urinbeutels am Bein ist folgendes Zubehör notwendig:

- Urinbeutel
- breites Klettband
- schmales Klettband



Bitte folgen Sie den einzelnen Schritten:

- 1 Öffnen Sie am breiten Klettband alle drei Klettstreifen
- 2 Führen Sie die unteren beiden Klettstreifen durch die oberen Schlitze des Urinbeutels
- 3 Der schmale Klettstreifen fixiert den Schlauch



- 4 Fixieren Sie alle Klettstreifen am Klettband
- 5 Passen Sie das Klettband Ihrer Größe an und kürzen es mit einer Schere am langen Ende des Klettbandes





- ⑥ Führen Sie das schmale Klettband durch die unteren Schlitzte am Urinbeutel
- ⑦ Ventil durch Verschieben öffnen oder schließen (zum Entleeren des Urinbeutels)
- ⑧ Bei Nichtverwendung wird das Ventil in die blaue Haltetasche (Doghouse) gesteckt. Das Doghouse entfällt bei 3-Kammer-Beinbeuteln



- ⑧
- ⑨ Der Urinbeutel kann je nach Vorliebe am Oberschenkel oder an der Wade getragen werden. Um die bestmögliche Drainage in den Beinbeutel zu gewährleisten, sollte der Beutel weit unterhalb des Blaseniveaus getragen werden



### Schlauchlänge anpassen:

(gilt nicht für die Tag-und-Nachtbeutel UVD-1030/60/90)

- ① Hände waschen und desinfizieren
- ② Schneidewerkzeug, z. B. Schere, desinfizieren
- ③ Schlauch durch Kürzen anpassen und abgetrenntes Ende entsorgen. (Achtung: Den Konnektor vom abgetrennten Ende nicht lösen und/oder wiederverwenden!)
- ④ Den separat mitgeführten Konnektor (blau) durch Stecken mit dem neuen Schlauchende verbinden.



a



b



c



d



### Urovision GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5  
 DE-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
 Telefon: +49 8032 973-410 / Fax: +49 8032 973-411  
 E-Mail: kundenservice@urovision.de  
 www.urovision-urotech.de

Urovision GmbH ist ein Unternehmen der Medi-Globe-Group. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Herstellers. © 2022 Urovision GmbH. HG-0000.DE.v1-1122