
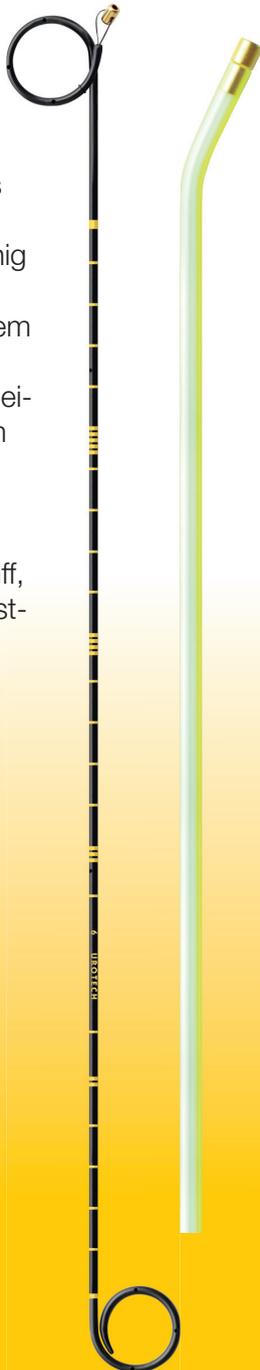


## Allgemeine Informationen nach dem Einsetzen eines Stents

Ihr Kind könnte anfangs etwas Unbehagen verspüren, häufig urinieren müssen oder ein wenig Blut im Urin bemerken. Viel Trinken hilft, um das Harnsystem durchzuspülen. Ihr Kind sollte anstrengende Aktivitäten vermeiden für ein paar Tage, wie vom Arzt empfohlen.

Befolgen Sie alle spezifischen Anweisungen nach dem Eingriff, die Ihnen Ihr Gesundheitsdienstleister gegeben hat.

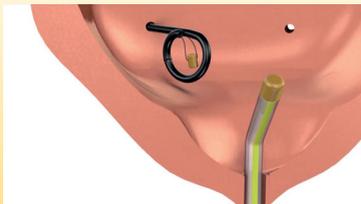

➤➤ Mehr Information:

SCAN MICH!



Produktanimation



Clinical Study Booklet

ICH HELFE DIR!



**UROTECH GmbH**  
Medi-Globe-Str. 1-5  
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Telefon: +49 (0) 8032 - 973-210  
Fax: +49 (0) 8032 - 973-211  
E-Mail: [info@urotech.com](mailto:info@urotech.com)  
[www.urovision-urotech.de](http://www.urovision-urotech.de)

UROTECH GmbH ist ein Unternehmen der Medi-Globe-Group. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Produktgebrauchsanweisung. ©2024 Urotech. FL-0015.DE.v1-0624



## PATIENTENINFORMATION

## MAGNETIC BLACK-STAR<sup>®</sup>

➤➤ Ihr Kind hat eine Harnleiterschiene implantiert bekommen?

Dieses Informationsblatt soll Ihnen bei dem weiteren Verlauf der Behandlung Ihres Kindes helfen.

## MAGNETIC BLACK-STAR®



Name der Klinik / Stempel



Abteilung / Arzt



Tag der Implantation



Tag des Entfernens



Telefon



E-Mail



### »» Liebe Eltern,

Ihr Arzt hat im Rahmen der urologischen Behandlung Ihres Kindes einen Harnleiterstent eingesetzt. Dieser Stent ist der **MAGNETIC BLACK-STAR®** von **UROTECH®**.

### »» Was ist ein Harnleiterstent?

Ein Harnleiterstent ist ein dünnes, flexibles Rohr, das in den Harnleiter eingesetzt wird, um einen ordnungsgemäßen Urinfluss von der Niere zur Blase zu gewährleisten.

### »» Warum wird ein Harnleiterstent benötigt?

Ein Harnleiterstent wird in den Harntrakt eingesetzt, entweder vor oder nach einer Operation, um Blockaden des Urinflusses zu verhindern. Diese Blockaden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie zum Beispiel einen Harnleiterstein oder Gewebeschwellungen nach einer Operation.

### »» Was macht den MAGNETIC BLACK-STAR® so besonders?

Der **MAGNETIC BLACK-STAR®** ermöglicht die Entfernung des Stents aus dem Körper ohne die Verwendung eines Zystoskops. Ein magnetisches Entfernungsggerät wird durch die Harnröhre in die Blase eingeführt und dient zur Entfernung des Harnleiterstents. Studien haben gezeigt, dass diese magnetische Entfernungsmethode deutlich schneller und viel komfortabler ist als andere Methoden und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Vollnarkose bei Kindern für den Stententfernungsprozess vermeiden kann.

### »» Nächste Schritte in der Behandlung

Der behandelnde Arzt wird Ihnen die nächsten Schritte in der Behandlung Ihres Kindes im Detail erklären. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, Ihren Arzt jederzeit zu fragen.

### »» Wann Sie den behandelnden Arzt kontaktieren sollten

Wenn Ihr Kind plötzlich **und** stark eines der folgenden Symptome bemerkt, kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Arzt: starke Blutungen, Fieber und Schüttelfrost, starke Flankenschmerzen, anhaltendes Druckgefühl in der Flanke.

### »» Wichtige Informationen



Der behandelnde Arzt wird Ihnen entweder das Entfernungsggerät für den Stent mitgeben, falls der Stent an einem anderen Ort entfernt werden soll, oder es in seiner Praxis verfügbar haben. Wenn Sie das Entfernungsggerät mit nach Hause nehmen, stellen Sie sicher, dass es sicher aufbewahrt wird, vor Beschädigungen geschützt, bei Raumtemperatur, trocken und vor Sonnenlicht geschützt.

Der behandelnde Arzt wird Ihnen eine Implantationskarte mit dem Namen, der Seriennummer und dem Hersteller des Stents im Körper Ihres Kindes ausstellen. Diese Karte hilft, das Produkt schnell zu identifizieren, z.B. im Notfall oder bei Sicherheitskontrollen am Flughafen. Stellen Sie sicher, dass Sie oder Ihr Kind die Karte immer bei sich tragen (z.B. im Portemonnaie).

Der **MAGNETIC BLACK-STAR®** Harnleiterstent ist **nicht** für die Verwendung mit MRT-Bildgebung geeignet. Er muss vor der Durchführung von MRT-Untersuchungen entfernt werden.



Bitte informieren Sie Ihren Arzt, dass Ihr Kind einen **MAGNETIC BLACK-STAR®** Harnleiterstent hat, bevor Sie einen MRT-Termin vereinbaren. Es sind keine bekannten Interferenzen mit allgemeinen Haushaltsprodukten bekannt. Es ist sicher, Gegenstände wie metallische Gürtel, Kinderspielzeug oder ähnliche Alltagsgegenstände zu verwenden und in deren Nähe zu sein. with general household products. It is safe to use and be around items such as: metallic belts, children's toys or similar everyday objects.